

病毒样本DNA/RNA保存液

产品简介

GenStar® 病毒样本 DNA/RNA 保存液适用于各种常见病毒拭子、液体样本的采集和常温运输，保证病毒核酸在 -20℃长期稳定保存或在室温一周内不降解，为获得下游实验所需的高质量核酸提供可靠保障。

产品优势

- **使用安全：**保存液中的胍盐成分可以快速灭活呼吸道病原体，使病毒失去感染性
- **稳定性好：**病毒样本核酸可在 -20℃长期稳定保存或在室温保存一周内不降解
- **结果可靠：**保存液中含有 DNase/RNase 抑制性成分，以保证核酸的完整，杜绝假阴性结果
- **适用性广：**适用于 DNA/RNA 病毒各类拭子、液体样品的采集、保存及运输

数据展示

► 保存 DNA 病毒样本稳定性测试

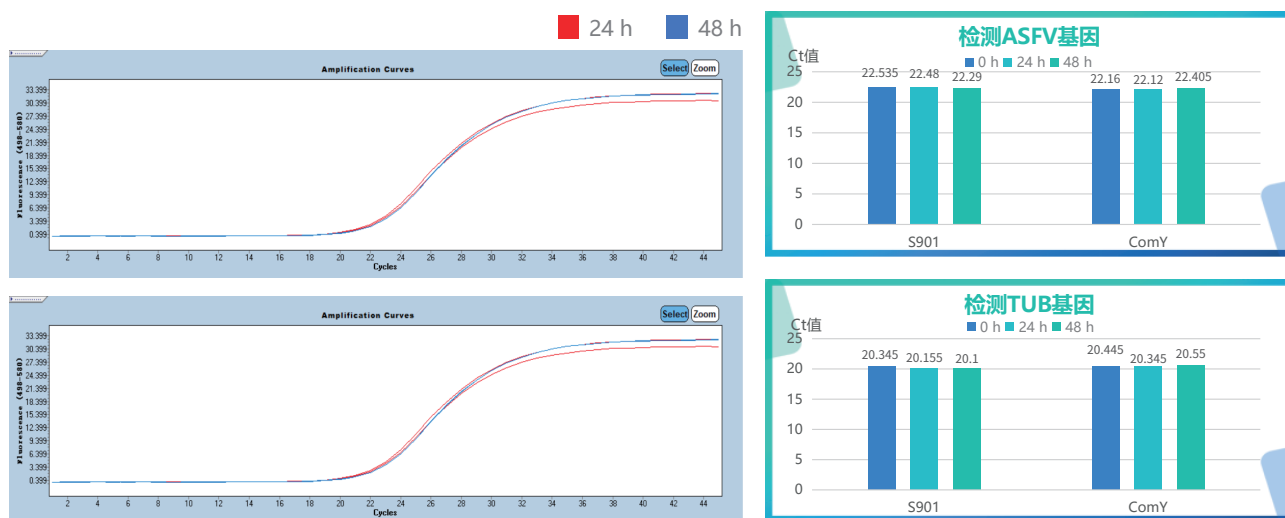


图1. DNA病毒(非洲猪瘟)样本保存稳定性测试

S901保存的非洲猪瘟组织置于37℃下分别保存24h、48h，与对照(37℃保存0h)相比，稳定性无差异

► 保存 RNA 病毒样本稳定性测试

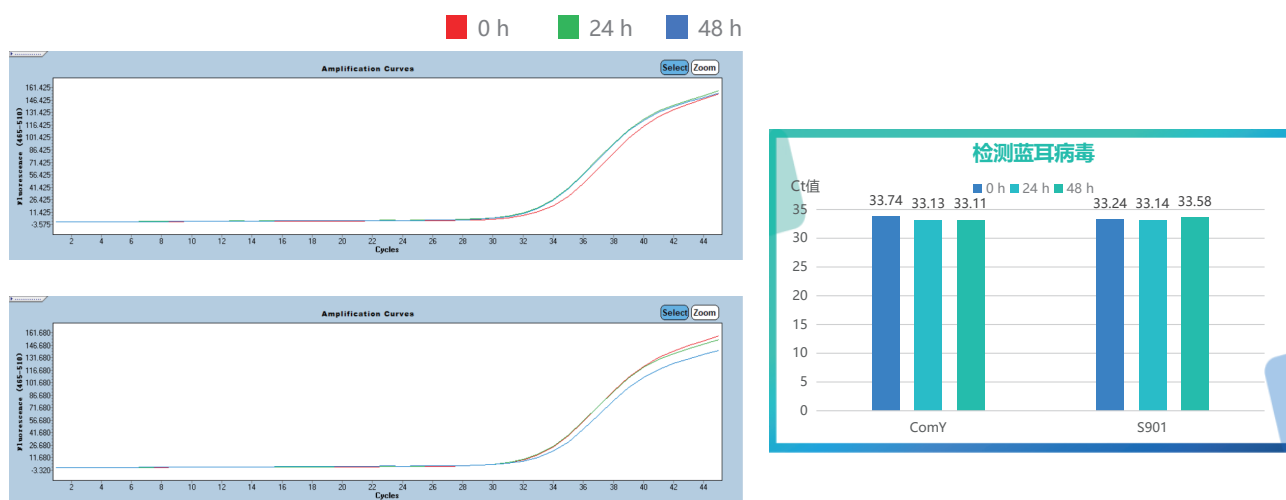


图2. RNA病毒(猪蓝耳)样本保存稳定性测试

S901保存的猪蓝耳组织置于37°C下分别保存24h、48h, 与对照(37°C保存0h)相比, 稳定性无差异

产品目录

产品名称	产品货号	规格	目录价(¥)
Inactivated Virus Sample Stabilizer 病毒样本 DNA/RNA 保存液 (灭活型)	S901-10	100ml	198



康润生物, 伴您生命科学成功之路。

康润生物 北京市昌平区生命园路4号院博雅CC1号楼A座6层 102206

T 400-666-3332 E tech.service@gene-star.com www.gene-star.com

